



WITNESS® FeLV ja FIV -testit ovat saatavissa myös erillisinä testeinä.

Käyttötarkoitus

Kissan leukoosiviruksen (FeLV) **antigeenin** ja kissan immuunikatoviruksen (FIV) **vasta-aineen** osoitus

Milloin käytetään?

Testiä käytetään, kun esitiedot tai oireet viittaavat retrovirusinfektioon.

Terve kissa:

- **pentu:** ensimmäinen eläinlääkärin tarkastus
- **aikuinen:** vuosittainen terveystarkastus tai kun tartuntariski on suuri

Sairas kissa:

- epäilty FIV-tartunta riippumatta iästä tai aiemmasta negatiivisesta tutkimustuloksesta

Näyte

Antikoaguloitu (EDTA, hepariini) kokoveri, seerumi tai plasma

Teho

Sensitiivisyys

FeLV 100 %¹
FIV 99 %¹

Spesifisyys

FeLV 98,6 %¹
FIV 99,3 %¹

Pakkaus

5 tai 10 testiä



KUINKA TESTIÄ KÄYTETÄÄN?



Tuloksen lukeminen ja tulkinta*: 10 minuutin kuluttua

VALIDI TESTI

Positiivinen tulos **TAI** **Negatiivinen tulos**

EI-VALIDI TESTI

Heitä pois ja toista **TAI** **Heitä pois ja toista**

* Testitulosta pitää tulkita ottaen huomioon saatavissa oleva kliininen tieto ja tutkittavan eläimen esitiedot.

- Positiivinen testitulosta tulee varmistaa, erityisesti kun kyseessä on oireeton ja pieniriskisessä ympäristössä elävä kissa.
- Emon vasta-aineet voivat aiheuttaa positiivisen FIV-tuloksen pennussa. Tällöin testi tulee toistaa. Jos testitulosta on positiivinen yli 6 kuukauden ikäisessä pennussa, pentua voidaan pitää infektoituneena.
- Pennun FeLV-antigeenit voidaan tutkia missä iässä hyvänsä.
- Rokotus tai maternaaliset vasta-aineet eivät haittaa FeLV-antigeenitestiä.

1- Pfizer - Synbiotics data on file: AWIFIVE - Version 5, Feline immunodeficiency virus antibody detection test. June 2006.

